

# Le NEURO Trainer se compose de :



## Un lecteur des Stimulations Sonores

de très Haute Qualité

comprenant le programme d'Ecoute personnalisé

## Un NeuroTrainer

qui permet l'ajustement des paramètres relatifs aux différentes sessions d'écoute

## 2 canaux de stimulation auditive:



**Stimulation classique (via l'oreille moyenne) :**  
casque audio de haute qualité.



**Stimulation de l'oreille interne :**  
vibreux osseux générant une stimulation sonore par voie occipitale (placé à l'arrière du crâne)



1

Assurez-vous que :

- le lecteur des stimulations sonores et que le NeuroTrainer sont tous 2 éteints.
- les boutons jaune et noir du Neurotrainer sont tous 2 au minimum et le bouton rouge % est sur 100%.

2

Effectuez ou vérifiez le câblage du casque et du vibreur osseux


- Le casque est relié à la prise AIR+OS
- Le vibreur osseux est connecté au casque

## CABLAGES



3

Allumez le lecteur en maintenant ce bouton pendant 2 sec puis relâchez-le.

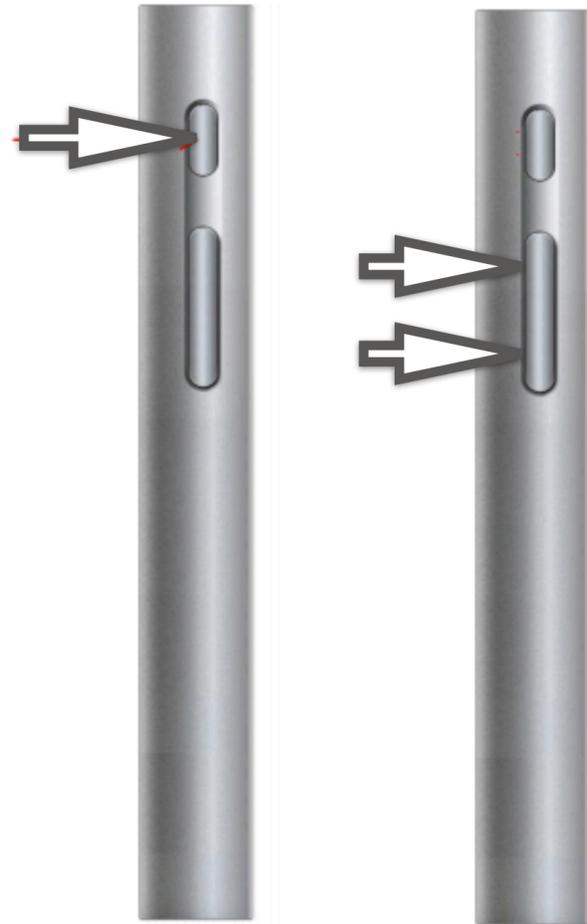

4

Sélectionnez le volume de départ à 90



5

Avant d'allumer le NeuroTrainer  
Positionnez le casque et  
et le vibreur (à l'arrière du crâne)



6


Allumez le NeuroTrainer  
Le voyant s'allume





7

Sélectionnez le dossier Musiques

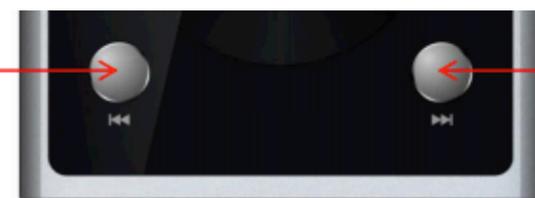

8

Sélectionnez la session 01



9

Confirmez votre choix



10

Augmentez progressivement le bouton **jaune (AIR)**, jusqu'à votre confort d'écoute. Notez le niveau obtenu. Ensuite, ramenez le bouton **jaune (AIR)** au minimum.




**a** Augmentez progressivement le bouton **noir (OS)**, jusqu'à votre confort d'écoute.

11


**b** Ensuite, repositionnez le bouton **jaune (AIR)** au niveau obtenu au

10

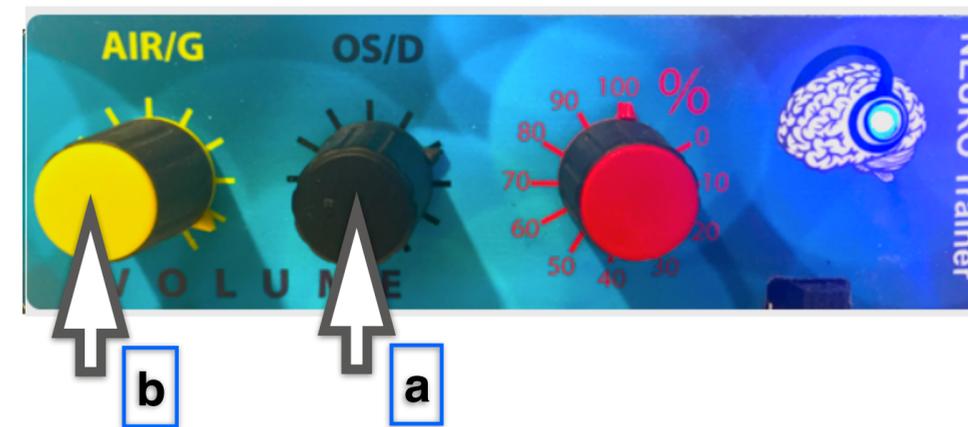

12

Définissez, si nécessaire un nouveau volume général

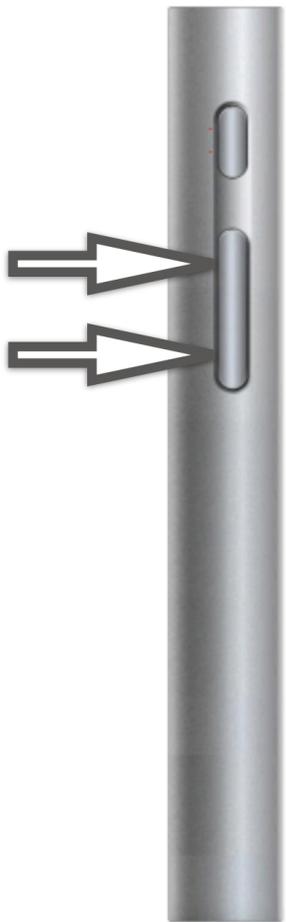

13

Sélectionnez la session désirée



14

Confirmez votre choix



15


...  
09\_LR\_80%  
10\_LR\_100%  
11\_RL\_80%  
...



En fonction de la session de votre programme d'écoute, définissez le % (bouton rouge)

positionnez le casque : écouteur gauche (L) à gauche et écouteur droit (R) à droite

ou INVERSEMENT (session 11 et suivantes)

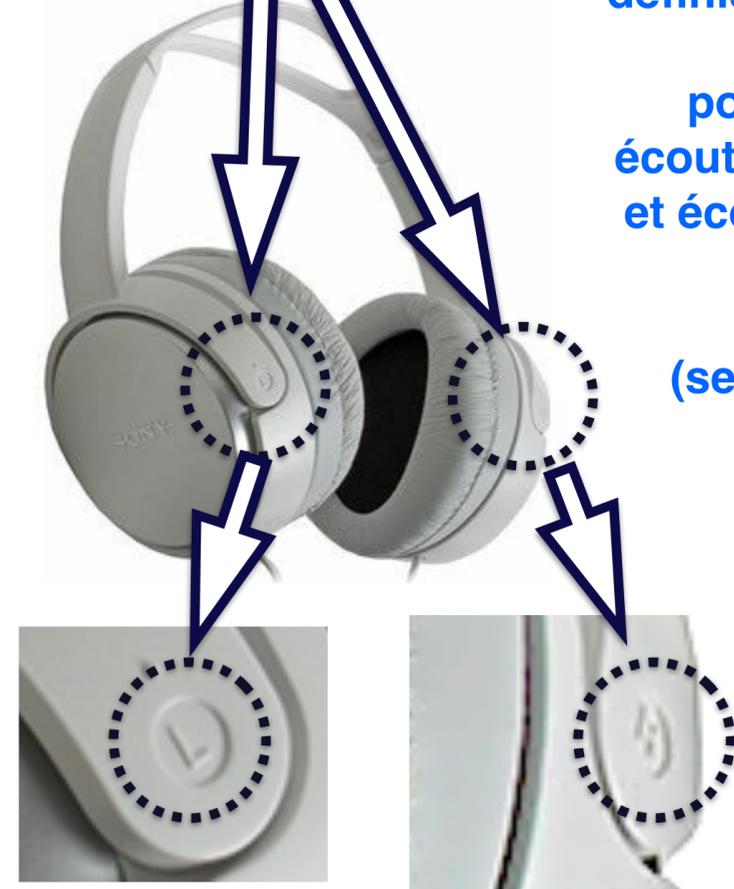


# CHARGE DES BATTERIES

Le lecteur et le NeuroTrainer contiennent chacun une batterie rechargeable.  
Nous vous conseillons de procéder à leur chargement toutes les 5 sessions d'écoute.

Raccordez le câble d'alimentation fourni: un côté à la prise USB du NeuroTrainer et l'autre côté à une source d'alimentation USB (ordinateur, prise secteur USB)



# Annexe:

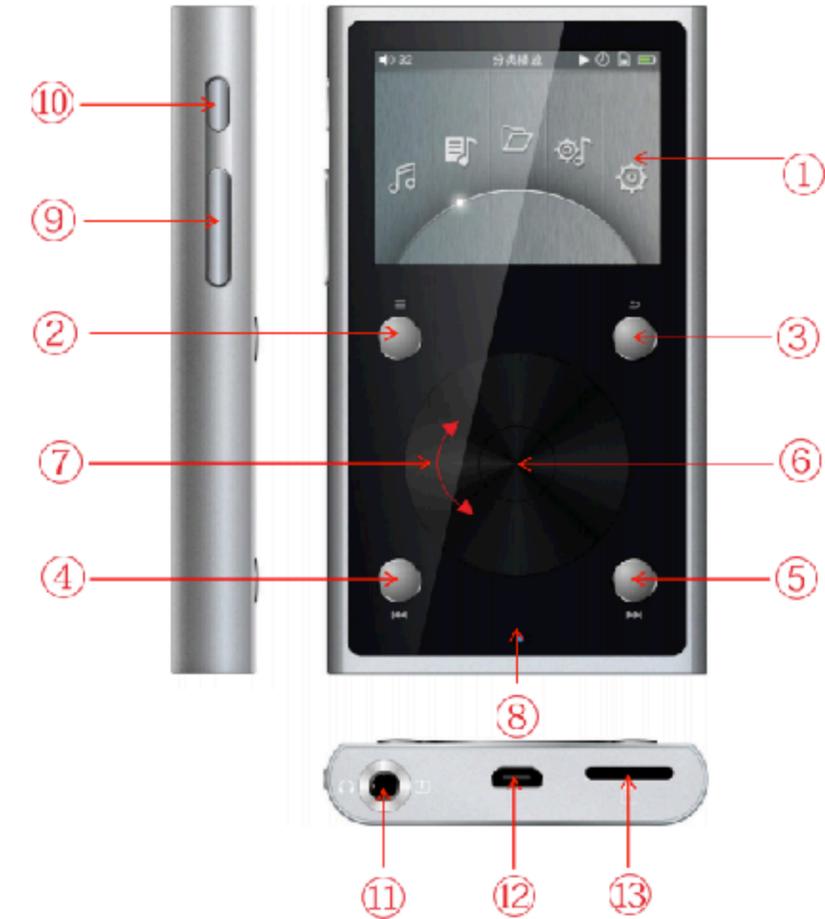

## 1) **Écran TFT couleur**

Affiche l'interface utilisateur et les informations. utiles pour faire fonctionner l'unité.

## 2) **Touche Menus:**

Cette touche affichera un menu différent en fonction du menu dans lequel vous vous trouvez.

3) **Retour / Menu principal:** Appuyez brièvement pour remonter d'un niveau de menu à chaque fois.

## 4) **Piste précédente / précédente:**

Dans l'écran "Lecture en cours": appuyez brièvement pour sélectionnez la session précédente;  
Dans les menus: appuyez brièvement pour choisir l'élément précédent (en haut) dans les menus.

## 5) **Piste suivante / suivant:**

Dans l'écran "Lecture en cours": appuyez brièvement sur cette touche pour sélectionner la session suivante,  
Dans les menus: appuyez brièvement pour choisir l'élément suivant (en bas) dans les menus..

## 6) **OK / Lecture / Pause :**

Dans l'écran "Lecture en cours": appuyez brièvement pour lire / mettre en pause;  
Dans les menus: appuyez brièvement pour accéder au sous-menu de l'élément sélectionné, ajustez le niveau / valeur / choix de l'élément sélectionné (à l'aide de la molette de défilement);

## 7) **Molette de défilement:**

Rotation de 360 : tournez la molette dans le sens horaire/antihoraire pour faites défiler l'élément de menu sélectionné.

## 8) **Voyant:**

Bleu pendant le travail, rouge pendant la charge, vert quand complètement chargé.

## 9) **Volume "+" Volume "-":**

Appuyez brièvement pour changer le volume.

## 10) **Bouton Power / Lock:**

Lorsque l'appareil est éteint, maintenez le bouton enfoncé pendant deux secondes et relâchez-le.

L'appareil s'allumera (après une courte pause).

Quand l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton pour verrouiller / déverrouiller le lecteur ou maintenez la touche enfoncée pendant trois secondes.

Pour éteindre, maintenez pendant dix secondes .